



#### 適用範圍

覆蓋於可能因醫療器材壓迫而造成壓瘡的皮膚上方。

#### 主要成份

聚氨酯薄膜、聚氨酯泡棉。

#### 使用方式

先清潔皮膚表面，待皮膚清潔部位乾燥後，將減壓墊放置於皮膚受壓處，可搭配繫繩使用。

#### 注意事項

1. 使用前檢視包裝和產品，若發現受損切勿使用。
2. 使用本產品若皮膚紅、腫、熱、痛、過敏或不適等現象，請立即停止使用，並尋求專業醫師診治。
3. 本產品勿使用於傷口上。

#### 保存方式

1. 置於室溫下，避免陽光直射、高溫、潮溼及重壓。
2. 產品未添加漂白劑，接觸空氣及光線後，如產生黃變乃屬正常現象，請放心使用。

#### 使用步驟



發明專利證號：I586345  
衛部醫器製登字第006565號

使用時膠膜面接觸皮膚

1. 使用時，取出減壓墊，以膠膜面接觸皮膚，尖端處對準鼻樑覆蓋於臉部，鑲空處露出口鼻，長方形附件可放置額頭上。

2. 呼吸面罩放置於減壓墊上方，確認減壓墊位置並調整呼吸面罩鬆緊度，即可完成。

\* 若需要將減壓墊固定在呼吸面罩上，以便照護者清理及進食，可利用附贈之繫繩，如上圖3、4，說明如下：  
取出繫繩後，單側穿過減壓墊上方之小孔，將繫繩繞過呼吸面罩與通氣管下方位置，再將繫繩繞至對側，穿過減壓墊上方之小孔，將繫繩兩端於呼吸面罩上方打結固定，即可完成。


## 畢儷護

### 呼吸面罩減壓墊 (未滅菌)

Mask Pressure Relief Pad (Non-sterile)

2 PCS 氧氣罩型

- 專利材料結構設計
- 有效分散壓力
- 預防壓瘡產生
- 仿膚設計透氣舒適

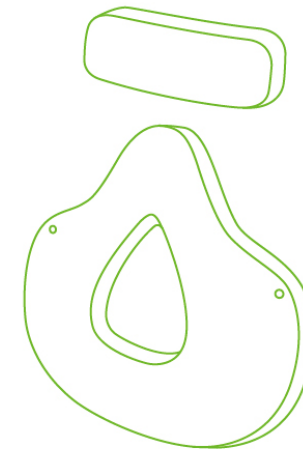

### Pellefeel 畢儷護

- ◆ 委託製造廠名稱：泰陸國際科技股份有限公司
- ◆ 委託製造廠地址：南部科學工業園區高雄市路竹區科二路65號1樓
- ◆ 藥商名稱：泰宗生物科技股份有限公司
- ◆ 藥商地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8



泰宗生物科技股份有限公司  
TCBI BIOTECH INTERNATIONAL CORP.

## 畢儷護減壓墊之優點

- ✓ 高密度泡棉層，能有效分散壓力。
- ✓ 通過SGS檢測，無刺激性、無致敏性。
- ✓ 不添加抗黃變劑，不含重金屬。
- ✓ 符合人體工學設計，服貼舒適。

**Pellefeel®**  
呼吸面罩減壓墊



## 市售產品比較



維持皮膚透氣性

減少摩擦力

## 人工皮長期使用之缺點

- ! 厚度僅 0.2 公分，減壓效果薄弱。材質透氣度不足。
- ! 含壓克力膠，易導致過敏。
- ! 具黏性，易拉扯肌膚，長期使用造成肌膚脆弱、產生壓瘡。
- ! 使用者必須自行剪裁使用，耗力費時；且無法重複使用。

	<b>Pellefeel®</b> 呼吸面罩減壓墊	市售人工皮	他牌減壓墊
使用便利性	專利設計 無須剪裁 直接使用	需自行剪裁	依使用需求 剪裁調整
面罩品牌 適用性	適用 Philips 及 ResMed 等多種 型號呼吸器面罩	?	?
皮膚舒適性	專利仿膚膜 不粘黏肌膚	具黏性 易拉扯皮膚 使皮膚脆弱	矽膠殘留
通過 SGS 生物相容性 檢測	符合國際標準 ISO 10993	?	?

